


# INSTRUCCIONES PARA COLOCACION DE ACOPLER "T" DEL BRAZO ARTICULADO

MODELO: MECO 5 LED NG

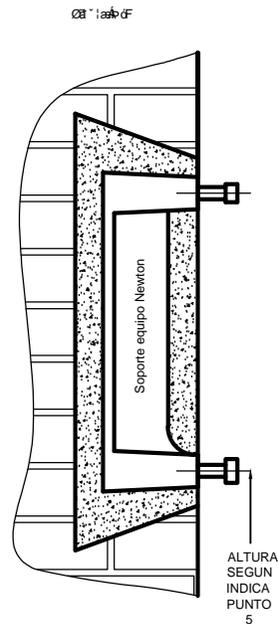

1. Efectuar corte en pared, conforme ilustra
2. Presentar y amurar con concreto, tomando como punto de apoyo para el nivel, los dos
3. ES SUMAMENTE IMPORTANTE QUE LOS PERFECTAMENTE A NIVEL
4. Dejar a filo del revoque de la pared, las tres zonas marcadas con rojo.
5. ALTURAS SUGERIDAS:  
(Tomadas desde el piso, al tornillo inferior del)
  - ODONTO - (Para trabajos sobre boca de paciente a 0.90mts): 1.20 / 1.30 mts
6. RECOMENDACIONES:
  - No retirar los tornillos ni la proteccion, hasta que el material este totalmente fraguado.
  - Tener presente que el equipo se provee con un cable de 2.5 mts de longitud.
  - Tener presente que el brazo plegado ocupa una distancia minima (desde su eje) de 0.60 mts. Esto es valido para el caso de que su ubicacion se encuentre proxima a otra pared o mueble.

